


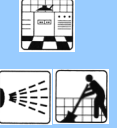




ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ДЕЗІНФЕКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ НЕОНАТОЛОГІЇ

Область застосування	Спосіб застосування	Періодичність використання	Засіб	Концентрація і експозиція	Хто виконує
Руки і шкіра					
	Миття рук і шкіри	У випадку необхідності. Після забруднення. У всіх випадках перед хірургічною та після гігієнічної дезінфекції рук	Санософт® Деконтасофт	Концентрат, 2-3 мл на руки	Весь персонал
	Гігієнічна дезінфекція рук	У випадку необхідності. Перед прийомом, після перерви, після прийому кожного пацієнта	Дезодерм¹ Деконтадез	3 мл – 30 с.	Весь персонал
	Обробка ін'єкційного поля	Перед пункціями і ін'єкціями. Перед пункціями і ін'єкціями суглобів, порожнин тіла і порожнистих органів	Дезодерм забарвл. Санойод	Стерильними марлевими тампонами, змоченими засобом, 15 с. – 1 хв.	Лікарі, медичні сестри
Інструменти (ВМП з гуми, пластмаси, металів, скла, включно з хірургічними інструментами)					
	Дезінфекція	Відразу після використання інструменти у розібраному вигляді занурюють у розчин засобу, витримують відповідно до часу експозиції вибраного режиму, виймають з ємкості і відмивають від залишків розчину під проточною холодною водою впродовж 1 хв.	Фамідез® форте Фамідез® Ендо	Фамідез® форте 1%, 60 хв./5 хв. ² Фамідез® Ендо 1%, 60 хв./5 хв. ²	Операційний персонал, медичні сестри
	Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням	Відразу після використання інструменти у розібраному вигляді занурюють у розчин засобу, витримують відповідно до часу експозиції вибраного режиму, виймають з ємкості і відмивають від залишків розчину під проточною холодною водою впродовж 1 хв.	Фамідез® форте Фамідез® Ендо	Фамідез® форте 1%, 60 хв./5 хв. ² Фамідез® Ендо 1%, 60 хв./5 хв. ²	Операційний персонал, медичні сестри
	Дезінфекція високого рівня та стерилізація	Інструменти у розібраному вигляді занурюють у розчин засобу, витримують відповідно до часу експозиції вибраного режиму, виймають з розчину і переносять у розчин із стерильною водою. Відмивання здійснюють протягом 3 хв. при повному зануренні інструментів у стерильну воду.	Фамідез® форте Фамідез® Ендо Фамідез® Ендоксіл	ДВР: Фамідез® форте 2%, 15 хв. Фамідез® Ендо 3%, 15 хв. Стерилізація: Фамідез® форте 6%, 120 хв. Фамідез® Ендо 3%, 180 хв. Фамідез® Ендоксіл, нерозв. 15 хв.	Операційний персонал, медичні сестри
Поверхні (кювети, медична апаратура, тонометри, маніпуляційні столи, загальні поверхні приміщень, санітарно-технічне обладнання)					
	Дезінфекція невеликих і важкодоступних поверхонь шляхом зрощування	Щоденно за необхідності: поверхні у приміщенні, предмети обстановки, інструменти простої конфігурації рівномірно зрости засобом до повного зволоження	Фамідез® АФ Фамідез АФ Пур	Бактерії і віруси: Деконтадез АФ, нерозв. 30 с. Фамідез® АФ (Пур): нерозв. 1 хв. Туберкульоз: Деконтадез АФ, нерозв. 30 с. Фамідез® АФ (Пур), нерозв. 1 хв.	Медичні сестри, санітари
	Дезінфекція профілактична, поточна, заключна поверхонь приміщень, предметів обстановки та догляду за хворими, приладів, ВМП, апаратів, санітарно-технічного обладнання. Генеральні прибирання	Щоденно і за необхідності: знезаражені поверхні протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу. Санітарно-технічне обладнання очищають щіткою або йоржом, змоченим розчином засобу. Саноксіл 006 не потребує змивання водою з будь-яких поверхонь, Фамідез® Екстра , Фамідез® Комбі , Фамідез® Комбі Нью , Санокварт – лише з тих, що не контактують із шкірою пацієнта або продуктами харчування	Саноксіл 006 Фамідез® Екстра Фамідез® Комбі / Комбі Нью Санокварт	Бактерії і віруси: Саноксіл 006: нерозв. 15 хв. Фамідез® Екстра: 0,25% 60 хв./0,5% 30 хв. Фамідез® Комбі, (Комбі Нью): 0,25% 30 хв./ 0,5% 15 хв. Санокварт: 1,0% 60 хв./2,0% 15 хв. Туберкульоз: Фамідез® Комбі, (Комбі Нью): 0,25% 30 хв./0,5% 15 хв., Саноксіл 006: нерозв. 60 хв.	Медичні сестри, санітари

Туалетні приміщення (душова кабіна, ванна, умивальник, унітаз, пісуар, керамічна плитка)

	Регулярне миття	Регулярно, впродовж робочого дня згідно виробничих інструкцій	Фамідез[®] Санітарний Медик + Унітаз: Фамідез[®] Гель для Туалету	Санітарний: 5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками протерти губками або серветками насухо.	Технічний персонал
	Видалення стійких забруднень	У випадку необхідності	Очищувач Санітарний	Нанести нерозведений засіб на забруднену поверхню, витримати 1 - 5 хв., протерти губками або щітками, змити водою.	Технічний персонал
	Дезінфекція	Регулярно, впродовж робочого дня згідно виробничих інструкцій	Фамідез[®] Комбі (Комбі Нью)	Протирання ганчірками, змоченими розчином: 0,25% - 30 хв.; 0,50% - 15 хв.	Технічний персонал
	Однчасне миття і Дезінфекція	Згідно з виробничими інструкціями	Фамідез[®] Ванна	Протирання серветками, змоченими розчином: нерозведений – 5 хв.	Персонал

¹ - Дезодерм / Дезодерм **TRIO**/ Дезодерм **Pur** / Дезодерм **Long**

² - при використанні ультразвуку

* - при обробці ультразвуком

